



iXTRON SPRINT ANGEL



**Фотосистема последнего
поколения для косметологии**

IPL-система для косметологии

iXTRON
SPRINT ANGEL

Advanced Light Technology (ALT)


световая технология последнего поколения

Система с двумя лампами обеспечивает бережное воздействие и удобство за счет компактной манипулы

Равномерное распределение флюенса по рабочему пятну и прямоугольная форма одиночного импульса обеспечивают высокую эффективность и безопасность процедур

Высокий флюенс – для превосходных результатов в самых сложных случаях

Высокотехнологичная манипула со сменными светофильтрами для быстрого и комфортного проведения процедур

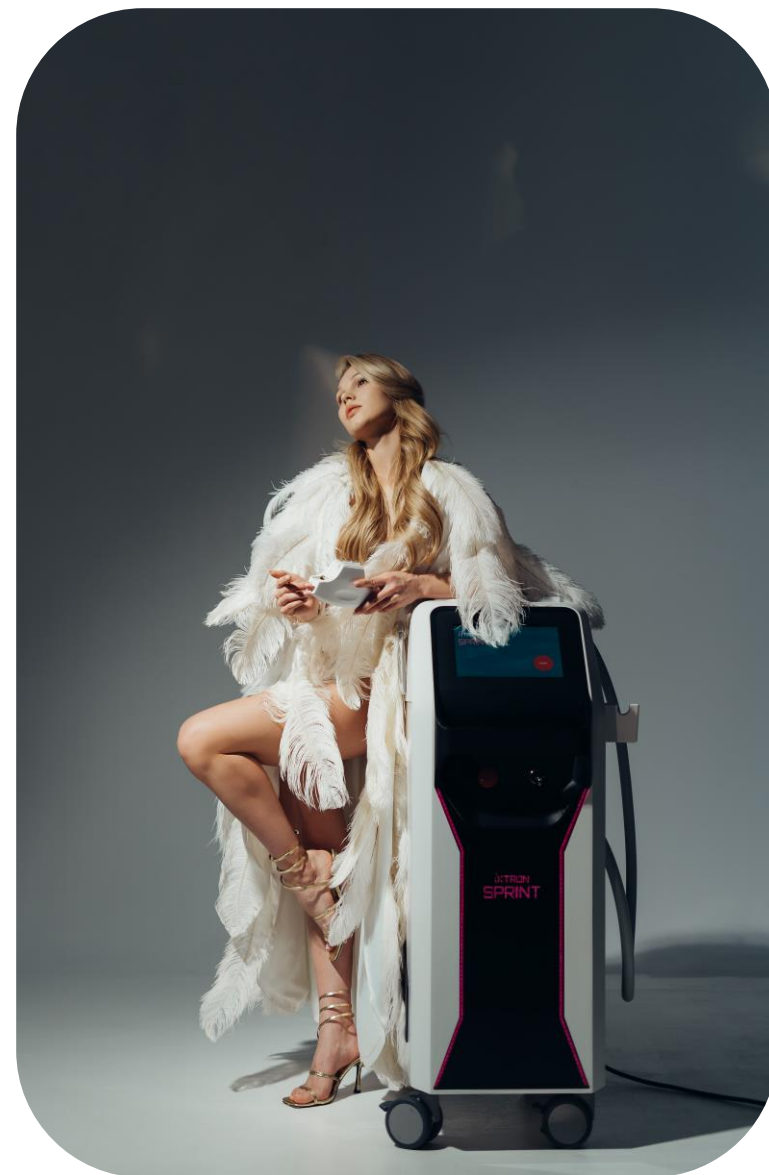

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

iXTRON
SPRINT ANGEL



Фотоомоложение
(коррекция
признаков фото-
и хроностарения)



Лечение
нарушений
пигментации



Лечение
сосудистых
патологий



Лечение акне



Фотоэпиляция


КОМПЛЕКТАЦИЯ

iXTRON
SPRINT ANGEL

Манипула
с несъемным окном




Сглаживающие
наконечники

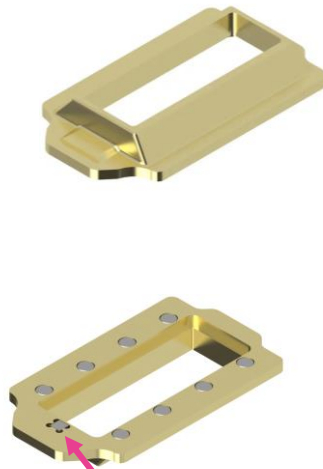

Автоматическое
определение размера
окна

Насадки с разными размерами окон

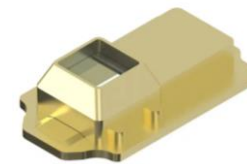

15x15 мм




15x8 мм



Ø7 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ

iXTRON
SPRINT ANGEL

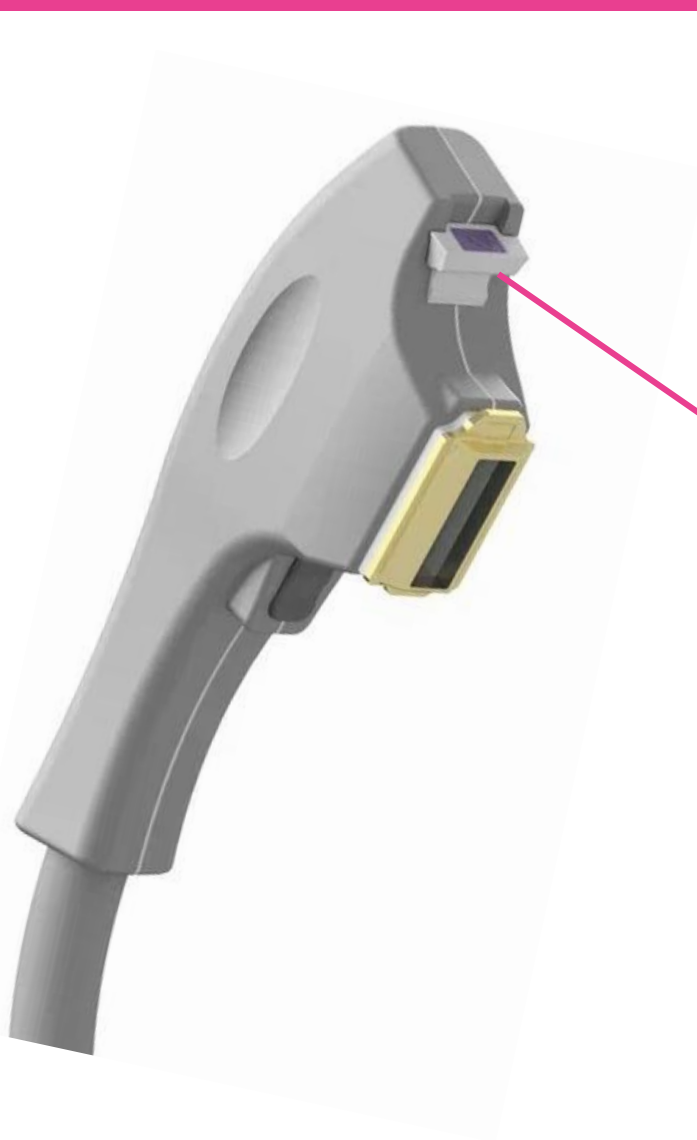

Хранение светофильтров и
насадок

Маркировка

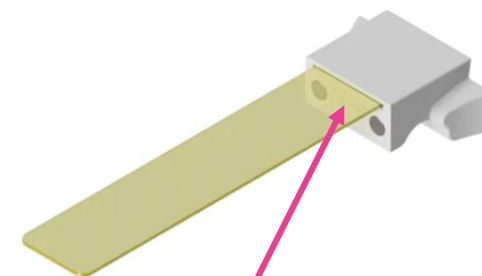

Автоматическое
определение светофильтра

НАБОР СВЕТОФИЛЬТРОВ

iXTRON
SPRINT ANGEL

10 СВЕТОФИЛЬТРОВ для обработки разных типов кожи (до V фототипа)

420 нм

Акне легкой или средней степени тяжести

515 нм

- Нарушения пигментации (дисхромия, гиперпигментация, мелазма, эфелиды)
- Рубцы
- Возрастные изменения кожи

560 нм

- Сосудистые патологии на лице, теле и конечностях, гемангиомы, гематомы
- Возрастные изменения кожи
- Акне легкой или средней степени тяжести

590 нм

- Нарушения пигментации
- Сосудистые патологии
- Акне легкой и средней степени тяжести
- Возрастные изменения кожи
- Фотоэпиляция

615 нм

- Лечение нарушений пигментации
- Фотоэпиляция

640 нм

- Акне легкой или средней степени тяжести
- Возрастные изменения кожи
- Фотоэпиляция

695 нм

- Возрастные изменения кожи
- Фотоэпиляция

800 нм

- Акне легкой и средней степени тяжести
- Возрастные изменения кожи

Acne

Специальный светофильтр
400-600 нм и 800-1200 нм

Vessels

Специальный светофильтр
530-650 нм и 900-1200 нм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

iXTRON
SPRINT ANGEL

Тип прибора	Фотосистема
Спектр излучения, нм	300 - 1400
Сменные светофильтры	420, 515, 560, 590, 615, 640, 695, 800 нм Acne (400-600 и 800-1400 нм) Vessels (530-650 и 900-1400 нм)
Режим работы	Импульсно-периодический, с возможностью формировать пачки импульсов Multi Pulse
Диапазон плотности энергии, Дж/см ²	1-30
Длительность пачки излучения, мс	5-500
Длительность одиночного импульса излучения, мс	0,5-1,5
Кол-во импульсов в пачке, шт.	2-10
Частота следования пачек, Гц	до 1 с шагом 0,1
Размер рабочего пятна, мм	15x45, 15x15, 15x8, Ø 7
Габариты (ШхВхГ), мм	400x1400x1050
Вес, кг	100



УДОБСТВО, СКОРОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ

- Легкосъемные насадки с разными размерами окон
- Автоматическое распознавание установленных светофильтров и насадок
- 2 режима работы: статический и динамический
- Предустановленные параметры и возможность гибкой подстройки индивидуально под пациента



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Пачка импульсов с паузами для охлаждения тканей обеспечивает более эффективное и безопасное воздействие при максимальном комфорте процедуры
- Контактное охлаждение, с возможностью установки необходимой температуры
- Высокая ресурсность ламп для снижения себестоимости процедур и срока окупаемости
- 10 светофильтров и 4 размера насадок для любых зон лица и тела



КОМФОРТ В РАБОТЕ

- Интуитивно понятный интерфейс на русском языке
- Управление излучением кнопкой на манипуле или педалью – на выбор пользователя
- Удобная система хранения светофильтров в корпусе
- Эргономичная компактная манипула



Melsytech

Medical Lasers & Genetics

МЕЛСИТЕК – ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЕДУЩИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ!

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!



ООО «Мелситек»
Россия, Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, Игумновское
шоссе, 11Д
8(800)302-68-09
<https://melsytech.com/>